


AED操作方法

①AEDの電源を入れる。

②パットの貼り付け位置を確認し、貼り付ける。

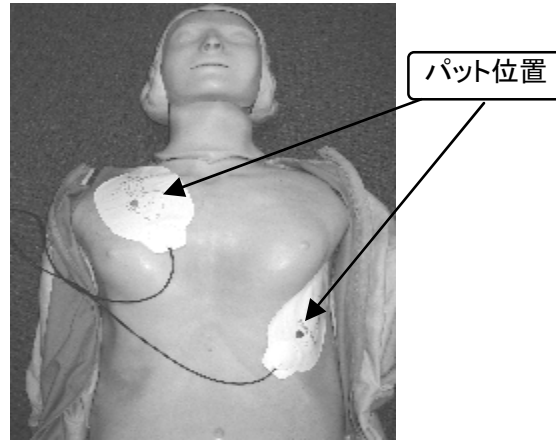

③コネクターを接続する（接続されている機種もあります）。

④電気ショックが必要かAEDが確認（心電図の解析）を行うため、倒れている人から離れるように周囲に伝える。



解析します、
離れてください！

解析の結果電気ショックが⇒
必要ならば ⑤ へ
必要なければ ⑥ へ

⑤電気ショックが必要と音声の指示があれば、離れるように周囲に伝え、誰も触れていないことを確認してショックボタンを押す。

放電します、
離れてください！



カチャ！



⑥電気ショック必要なし、または電気ショック後は、それぞれのAEDの音声指示に従い胸骨圧迫からCPR（胸骨圧迫30回：人工呼吸2回を繰り返す）を開始する。



※AEDの機種によっては「循環サイン（呼吸・脈拍）を確認して・・・」という音声指示がありますが、原則は指示に従います。ただし、行う確認は呼吸確認だけとし、正常な呼吸がなければCPR（胸骨圧迫30回：人工呼吸2回）を開始する。